

Problemas conocidos en pacientes del sistema Sensinel™ CPM



Nº de anomalía conocida	Descripción	Solución
WIL-KAA1011_01	El dispositivo Sensinel CPM en raras ocasiones podría permanecer en modo de carga luego de desconectarlo de la estación base y no tomará una medida.	Contáctese con el Soporte de Sensinel CPM.
WIL-KAA1011_02	El dispositivo Sensinel CPM en raras ocasiones podría indicar que la batería está baja cuando se carga la batería y no tomará una medida.	Contáctese con el Soporte de Sensinel CPM.
WIL-KAA1011_03	La carga de los datos de las medidas desde el dispositivo Sensinel CPM falla.	Desconecte el dispositivo Sensinel CPM de la estación base del Sensinel CPM, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo a la estación base CPM.
WIL-KAA1011_04	La estación base del Sensinel CPM no funciona con normalidad.	Contáctese con el Soporte de Sensinel CPM.